

## BISCO

### AQUA-PREP F

Fluorisano sredstvo za ponovno kvašenje i smanjenje osetljivosti

#### Uputstvo za upotrebu i Tabela sa podacima o bezbednosti materijala

## BISCO

Specijalisti za adhezivnu i kompozitnu tehnologiju

### OPŠTI PODACI

AQUA-PREP F, vodeni rastvor fluorida i hidrosietil metakrilata (HEMA), je sredstvo za ponovno kvašenje koje se koristi pre nanošenja hidrofилnih sistema adhezivnih smola kao što su ALL-BOND\* 2 ili ONE-STEP\*. AQUA-PREP F rešava pitanje koje se često postavlja, »Koliko je nešto zaista mokro?« Nanošenje AQUA-PREP F obezbediće idealnu količinu vlage neophodne za vezivna sredstva. Pored toga, nedavna univerzitetska studija je pokazala da AQUA-PREP F obezbeđuje zonu sprečavanja karijesa u okolnoj strukturi zuba<sup>1</sup>. AQUA-PREP F nanosi se na preparat u kavitetu nakon nagrizanja kiselinom i malo se prosuši da bi se osiguralo da na preparatu ostane odgovarajući nivo vlage. AQUA-PREP F može da pomogne da se ublaži postoperativna osetljivost u slučaju kada je takvo stanje uzrokovano preteranim sušenjem ili neodgovarajućim kvašenjem dentina.

### UPUTSTVO

1. Nagrizajte dentin i gleđ 15 sekundi 32-postotnom fosfornom kiselinom kao što je UNI-ETCH koji sadrži BAC\*\*. Dobro isperite oko 5 sekundi.
2. Sušite strujom vazduha 2-4 sekunde. Suva, *ali ne i isušena* površina idealna je pre nanošenja AQUA-PREP F. Dentin treba da ima mat izgled, a nagrizena gleđ treba da izgleda kao mlečno staklo.
3. Odmerite 2 kapi AQUA-PREP F u posudicu za mešanje. Četkicom nanesite na površine dentina i gleđi. Ne nanosite pomoću kuglice vate.
- 4. Ostavite AQUA-PREP F da se natapa 20 sekundi.**
5. Blago osušite strujom vazduha AQUA-PREP F da biste uklonili višak. Izbegavajte nakupljanje, naročito na unutrašnjim kontaktnim uglovima preparata. Površina koja nastane treba da ima sjajan izgled.
6. Nanesite sistem adhezivnih smola kao što je ALL-BOND 2 ili ONE-STEP prema uputstvima proizvođača.

### SKLADIŠTENJE

Uskladištite na sobnoj temperaturi (22°C/72°F). Proverite određene rokove trajanja na etiketama pojedinačnih komponenti.

### MERE PREDOSTROŽNOSTI

Nepolimerizovane smole mogu da izazovu povećanje osetljivosti kože kod podložnih osoba. U slučaju kontakta s kožom, dobro isperite sapunom i vodom.

## **PAKOVANJE**

REF B-2822P

1 flašica (6 ml) AQUA-PREP F, Uputstvo/Tabela

REF B-2824P

1 flašica (30 ml) AQUA-PREP F, Uputstvo/Tabela

## **GARANCIJA**

Firma BISCO Inc. priznaje svoju obavezu da zameni proizvode ukoliko se dokaže da su neispravni. BISCO Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, bilo direktne ili indirektne, koji nastaju zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kako je opisano. Pre upotrebe, korisnik je obavezan da utvrdi prikladnost proizvoda za određenu upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s tim.

---

<sup>1</sup> Donly K, Segura A, Quackenbush B: »Laboratorijski efekti sprečavanja demineralizacije dentina pomoću eksperimentalnog fluorisanog sredstva za kvašenje koje sadrži HEMA i vodu« (prihvaćeno za objavljivanje)

\* ALL-BOND 2 i ONE-STEP su registrovani zaštitni znaci firme BISCO Inc.

\* AQUA-PREP F je zaštitni znak firme BISCO Inc.

\*\* BAC je benzalkonijum hlorid